



NAVODILA ZA UPORABO ERKODENT ERKOLOC-PRO OPORNICE

1. Namen:

Termoformirane folije za izdelavo opreme za zobozdravstveno in ortodonsko zdravljenje vseh skupin bolnikov.

2. Področje uporabe:

Erkoloc-Pro je primeren za izdelavo globoko vlečenih intraoralnih opornic in pripomočkov, kot so opornice za ugric, opornice za škrtanje, alignerji, korektivne opornice, opornice proti smrčanju.

3. Kontraindikacije:

Če so že znane alergijske reakcije na umetne mase, je treba izključiti specifično alergijo na Erkoloc-pro.

4. Previdnostni ukrepi:

Erkoloc-Pro je priporočljiv samo za zgoraj navedeno opremo. Upoštevajte navodila za shranjevanje.

Pozor, občutljivo na vlago: aluminijasto vrečko takoj ponovno tesno zaprite.

5. Pozor:

Uporaba je omejena na izdelavo zobozdravstvenih in ortodontskih aparatov. Za uporabo je odgovoren zdravnik. Uporabljajte le na priporočilo ali na recept pooblaščenega zdravnika. Samo za enkratno uporabo (globoko vlečenje). Alergijske reakcije so malo verjetne, vendar jih ni mogoče izključiti. Nepravilna obdelava lahko privede do razpok, zlomov in ostrih robov. V primeru majhnih odkrušenih delcev obstaja nevarnost aspiracije. Uporabnik mora o resnih incidentih, ki vključujejo Erkoloc-Pro, poročati pristojnemu organu in proizvajalcu.