

NAVODILA ZA UPORABO IN NEGO ERKODENT PLAYSAFE ŠPORTNEGA ŠČITNIKA

Spoštovani,
čestitke ob prejemu kakovostnega športnega ščitnika PlaySafe! Da boste izkoristili vse njegove prednosti – zaščito, udobje in dolgo življenjsko dobo – je pri uporabi, negi in shranjevanju pomembno upoštevati spodnje smernice.

1. Namestitev in uporaba

- Individualna izdelava: Vaš ščitnik je ročno izdelan po odtisu zgornje čeljusti, ki vam ga odvzame zobozdravnik in preda v izdelavo v zobotehnični laboratorij.
- Pravilna prileganost: Zelo natančno se oprime zob, se ne premika ter dihanje in govor ostaneta neovirana.
- Namestitev: Pred uporabo sperite z vodo in ga primerno namestite na zgornje zobe.

2. Čiščenje in higiena

- Uporabljajte mehko ščetko in tekoče blago milo ali detergent (nič zobne paste).
- Sperite pod tekočo vodo, posušite s papirnato brisačo.
- Priporočeno: namočite za v to namenjeno čistilno tableto za optimalno higieno.
- Sperite pred vsako uporabo.

3. Shranjevanje in zaščita

- Shranjujte pri sobni temperaturi, stran od UV svetlobe in toplote (ne nad 45 °C in ne pod –5 °C).
- Uporabite originalno škatlico z zračnimi odprtini.
- Izogibajte se težkim predmetom, da ne deformirate ščitnika.

4. Varnostne omejitve

- Noben ščitnik ne prepreči vseh poškodb.
- Ne žvečite ga – to zmanjša zaščitni učinek.
- Takoj zamenjajte ščitnik, če se pojavijo razpoke, razslojenost ali deformacije.

5. Življenjska doba

- Pri redni uporabi (športno 2–3x tedensko) je ob primerni negi priporočena zamenjava po 6 mesecih, v vsakem primeru pa najkasneje po 12 mesecih.
-

6. Materiali in konstrukcija

- Playsafe triple: Iz pred laminiranega sloja (mehko–trdo–mehko, debeline 5,5 mm), s fleksibilno in večslojno zaščito.
 - Omogoča zadostno debelino za absorpcijo udarcev, hkrati pa ostaja udoben za govor in dihanje .
 - Na voljo v več barvah in možnost individualnega.
-

7. Prilagajanje in popravilo

- Prilagoditve naj opravi zobni tehnik z ustrezno opremo.
 - Če se ščitnik slabo pritega, je ohlapen ali povzroča nelagodje – obiščite zobozdravnika.
-

Povzetek

- Uporaba: pravilna namestitvev, skrb za ustno higieno.
 - Čiščenje: mehka ščetka + milo, brez paste.
 - Shranjevanje: suho, pri sobni temperaturi, v škatli.
 - Zamenjava: na 6–12 mesecev ali ob poškodbah.
 - Vzdrževanje: naj bo strokovno (zobozdravnik, zobotehnik).
-

Z dosledno nego in uporabo vam bo PlaySafe ščitnik zagotavljal zanesljivo zaščito in udobje pri vsakem športnem podvigu. V primeru vprašanj ali težav se obrnite na vašega zobozdravnika ali tehnika. Srečno in varno športanje! 🏆